

GUIA RÁPIDO – FOCO CIRÚRGICO TETO

LEMBRE-SE SEMPRE DE CONSULTAR O MANUAL DO USUÁRIO COMPLETO PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS.

Este guia é um resumo. Para mais detalhes sobre desembalagem, montagem, uso, conexão, limpeza e assepsia, consulte o Manual do Usuário disponível no site da ANVISA no link abaixo:

Produtos para Saúde ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351963961202119/?cnpj=201102553000162&situacaoNotificacaoRegistro=1>


PARA DESEMBALAR, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:



ATENÇÃO: Caso a instalação seja realizada pelo fabricante, aguarde a chegada do técnico responsável. Ele será o encarregado de remover completamente o equipamento da embalagem.

Para desembalar seguir as instruções abaixo:


1. Retire o produto de dentro da caixa. Abra a parte superior da embalagem e retire cada um dos componentes avulsos, verificando se todos estão intactos.
2. Confira os acessórios que acompanham o produto. Se encontrar algo em desacordo, entre em contato imediatamente com o fabricante por meio do telefone (41) 3138-5900.
3. Antes de iniciar qualquer procedimento com o dispositivo, leia o manual do usuário. Ele contém informações necessárias para a correta instalação e utilização.
4. Antes da instalação, verifique se a tensão da rede (VAC) e a frequência (Hz) no local correspondem àquelas indicadas na etiqueta nº de série.

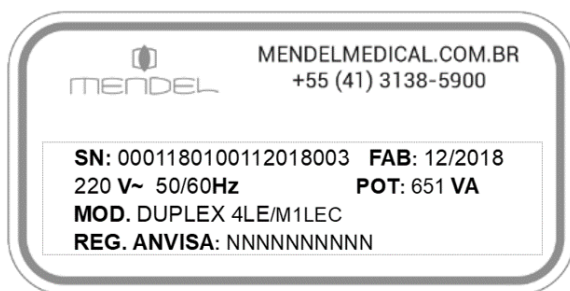

PREPARAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO:

- A pré-instalação do dispositivo deve seguir as orientações específicas do fabricante, variando de acordo com o modelo adquirido.
- A fabricante Mendel Medical não se responsabiliza por danos decorrentes de uma pré-instalação inadequada.
- É responsabilidade do estabelecimento da saúde garantir que o local de instalação esteja pronto conforme instruções fornecidas.

ou por meio do QR CODE, site do fabricante:

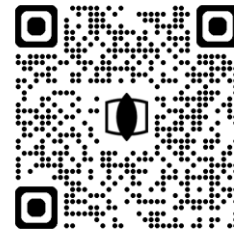

- A fabricante Mendel Medical oferece suporte técnico para o usuário, sempre que necessário, também fornecerá treinamento de uso para os dispositivos adquiridos.

INSTALAÇÃO:

- A instalação pode ser incluída no contrato, sujeita a acordo prévio registrado na proposta comercial.
- Técnicos autorizados pela fabricante realizarão a instalação, com a presença de um representante do estabelecimento da saúde.
- Após a instalação, há um período para avaliar o funcionamento dos dispositivos instalados e relatar qualquer problema ao fabricante.



ATENÇÃO: A pré-instalação deve ser realizada apenas por pessoas qualificadas. Verifique se as condições mínimas são atendidas antes da instalação para garantir o funcionamento adequado do dispositivo.

Antes da instalação, verifique se as seguintes condições mínimas são atendidas:

- Recomenda-se que o Foco Cirúrgico seja montado diretamente sobre uma caixa de passagem. Se isso não for possível, as linhas de fornecimento de energia de entrada devem ser ligadas de acordo com todos os códigos de construção aplicáveis.
- Utilize fiação adequada para evitar problemas de superaquecimento dos fios. As chaves internas da caixa LTT ligam apenas a energia ao transformador.
- Caixa de comando: É recomendado que a alimentação do circuito seja provida por meio de um disjuntor, que também funcionará como a chave geral de desligamento de energia.
- A conexão entre as caixas de passagem deve ser feita utilizando eletrodutos com Ø 1 polegada. O uso de eletrodutos de diâmetros menores pode impossibilitar a passagem dos cabos.
- Certifique-se de que a armação estrutural atenda às condições mínimas de segurança para evitar ferimentos.
- Conecte o dispositivo a uma rede de alimentação com aterramento de proteção, conforme exigências da

GUIA RÁPIDO – FOCO CIRÚRGICO TETO

norma ABNT NBR-5410 “Instalações Elétricas em Baixa Tensão”. A não utilização do fio terra resultará na perda da garantia do dispositivo.

- Para dispositivos com sistema de emergência, este deve ser montado próximo ao teto, em série com a caixa de comando. Para Focos Teto Simplex e Focos Parede, o Sistema de Emergência substitui a caixa de comando.

Preparação para Instalação do dispositivo

Antes de prosseguir com a instalação do dispositivo, é crucial as verificações e preparativos. Estes passos são essenciais para garantir uma instalação adequada e sem contratempos. Abaixo estão os pontos que devem ser verificados antes de acionar a assistência técnica autorizada:

- Remoção do Equipamento Anterior: Certifique-se de que qualquer disposto equipamento anteriormente instalado foi devidamente removido para liberar espaço e evitar interferências.
- Furação para Fixação: Verifique se a furação necessária para a fixação do novo dispositivo foi realizada conforme as especificações.
- Passagem de Cabos Elétricos: Garanta que os eletrodutos e cabos elétricos tenham sido passados de acordo com as instruções fornecidas, garantindo uma conexão elétrica segura e adequada.
- Cabeamento de Sinais: Se aplicável, certifique-se de que também foi realizado o cabeamento de sinais conforme as orientações específicas do dispositivo.
- Material de Instalação: Certifique-se de ter adquirido todo o material necessário para a instalação, como barras roscadas, arruelas, porcas, chumbador químico, entre outros, conforme as indicações do fabricante.
- Reserva da Sala: Agende a instalação em uma data conveniente e assegure-se de que a sala onde o equipamento será instalado esteja reservada e disponível.
- Acompanhamento Técnico: Designe uma pessoa da equipe de manutenção para acompanhar os técnicos durante a instalação, fornecendo suporte e esclarecendo dúvidas, se necessário.

Após verificar todos esses pontos, entre em contato com a assistência técnica autorizada e envie uma foto da pré-instalação.




ATENÇÃO: O envio das fotos é obrigatório para que a equipe possa avaliar e prosseguir com o processo de instalação de forma eficiente e segura.

• REPOSITÓRIO DOCUMENTAL

Acesse documentos digitais do dispositivo médico via QR CODE:

- ✓ Manuais do Usuário: instruções de detalhadas de uso do dispositivo.
- ✓ Guias Rápidos: instruções concisas do manual.
- ✓ Vídeos Tutoriais: conteúdos visuais de suporte.
- ✓ Outros: documentos adicionais que possam ser úteis para uso, montagem, manutenção entre outros.

Escaneie o QR CODE para acessar e utilizar o dispositivo com segurança e eficiência.

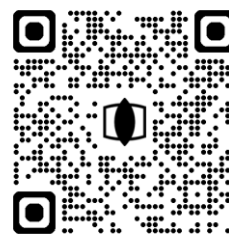

QR CODE é um código que armazena informações. Para ler você precisa:

- ✓ Equipamento portátil: Smartphone ou tablet com câmera.
- ✓ Aplicativo de leitura: Leitor de QR CODE ou câmera.
- ✓ Internet: conexão com a internet será necessária para acessar o conteúdo.

Abra o aplicativo ou a câmera, aponte para o QR CODE e o conteúdo será exibido automaticamente.




ATENÇÃO: Certifique-se de que a versão das instruções de uso corresponde ao dispositivo adquirido.



ATENÇÃO: Para obter a versão impressa das instruções de uso sem custo adicional, entre em contato com a Fabricante pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Se tiver dúvidas, ligue para o SAC mencionado no rodapé deste documento.

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO

- +55 (41) 3138-5900 
- WhatsApp: +55 (41) 9 9518-0006 
- Horário de Atendimento: Seg - Sex: 8:00h às 17:45h 
- E-mail: assistenciatecnica@mendelmedical.com.br 

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	IDIOMA
MM013-090071	00	18/07/2024	Português