


LEMBRE-SE SEMPRE DE CONSULTAR O MANUAL DO USUÁRIO COMPLETO PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS.

Este guia é um resumo. Para mais detalhes sobre desembalagem, montagem, uso, conexão, limpeza e assepsia, consulte o Manual do Usuário disponível no site da ANVISA no link abaixo:

Produtos para Saúde ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351987410202132/?cnpj=20102553000162&situacaoNotificacaoRegistro=1>

ou por meio do QR CODE, site do fabricante:

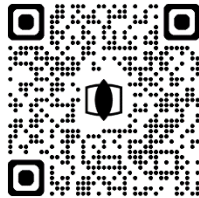

ATENÇÃO: Caso a instalação seja realizada pelo fabricante, aguarde a chegada do técnico responsável. Ele será o encarregado de remover completamente o equipamento da embalagem.

PARA DESEMBALAR

1. Verifique a integridade da embalagem ao recebê-la.
2. Abra cuidadosamente a embalagem de madeira.
3. Remova o dispositivo e confirme que está intacto e completo.
4. Confira se o número de série do dispositivo coincide com o indicado na nota fiscal.
5. Antes da instalação, certifique-se de que a tensão e a frequência da rede elétrica correspondem às especificações na etiqueta do número de série.





MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Não há necessidade de montagem e instalação. O dispositivo é entregue pronto para o uso.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Conecte o cabo de alimentação à rede elétrica.
2. Ligue o dispositivo posicionando a chave liga/desliga na posição (I).
3. Ajuste a altura do braço soltando a peça fixadora, ajustando e apertando novamente.
4. Para movimentar a cúpula, afrouxe o manípulo, incline para a posição desejada e aperte novamente.
5. Desligue o dispositivo colocando a chave liga/desliga na posição (O).

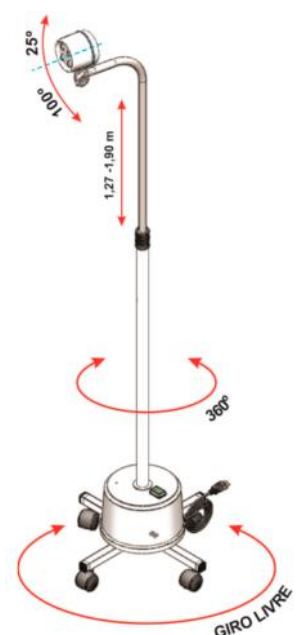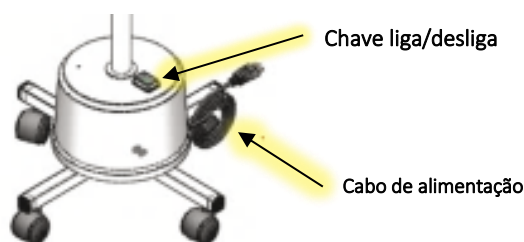

GUIA RÁPIDO – FOCO AUXILIAR PARABÓLICO

FUSÍVEIS E COMUTADORES TÉRMICOS

Para troca de fusíveis, utilize os seguintes valores:

- Fusíveis F1 e F2 para 127Vac e para 220Vac - 0,5 A com retardo.

• REPOSITÓRIO DOCUMENTAL

Acesse documentos digitais do dispositivo médico via QR CODE:

- ✓ Manuais do Usuário: instruções de detalhadas de uso do dispositivo.
- ✓ Guias Rápidos: instruções concisas do manual.
- ✓ Vídeos Tutoriais: conteúdos visuais de suporte.
- ✓ Outros: documentos adicionais que possam ser úteis para uso, montagem, manutenção entre outros.

Escaneie o QR CODE para acessar e utilizar o dispositivo com segurança e eficiência.



QR CODE é um código que armazena informações. Para ler você precisa:

- ✓ Equipamento portátil: Smartphone ou tablet com câmera.
- ✓ Aplicativo de leitura: Leitor de QR CODE ou câmera.
- ✓ Internet: conexão com a internet será necessária para acessar o conteúdo.


Abra o aplicativo ou a câmera, aponte para o QR CODE e o conteúdo será exibido automaticamente.



ATENÇÃO: Certifique-se de que a versão das instruções de uso corresponde ao dispositivo adquirido. Para obter a versão impressa das instruções de uso sem custo adicional, entre em contato com a Fabricante pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Se tiver dúvidas, ligue para o SAC mencionado no rodapé deste documento.

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO

+55 (41) 3138-5900 

WhatsApp: +55 (41) 9 9518-0006

Horário de Atendimento: Seg - Sex: 8:00h às 17:45h

E-mail: assistenciatecnica@mendelmedical.com.br

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	IDIOMA
MM013-090073	00	18/07/2024	Português