

# GUIA RÁPIDO - MESA CIRÚRGICA KRATUS

**LEMBRE-SE SEMPRE DE CONSULTAR O MANUAL DO USUÁRIO COMPLETO PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS.**

Este guia é um resumo. Para mais detalhes sobre desembalagem, montagem, uso, conexão, limpeza e assepsia, consulte o Manual do Usuário disponível no site da ANVISA no link abaixo:

**Produtos para Saúde ANVISA:**


<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351060214202208/?cnpj=201102553000162&situacaoNotificacaoRegistro=1>

## PARA DESEMBALAR, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:




**ATENÇÃO:** Caso a instalação seja realizada pelo fabricante, aguarde a chegada do técnico responsável. Ele será o encarregado de remover completamente o equipamento da embalagem.


- a. Retire o produto de dentro da caixa, conforme tópico DESEMBALAGEM.
- b. Confira os acessórios que acompanham o produto. Se encontrar algo em desacordo, entre em contato imediatamente com o fabricante por meio do telefone (41) 3138-5900.

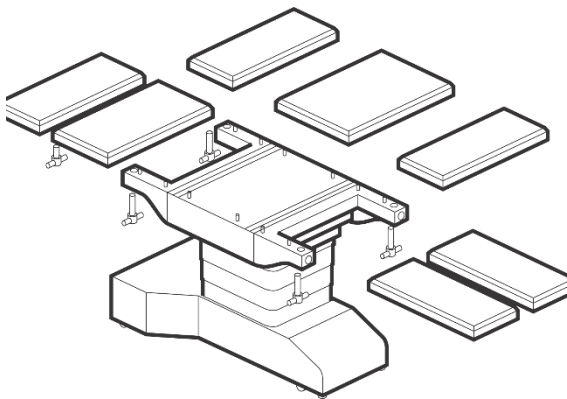

- c. Confira se o número de série do dispositivo coincide com o indicado na nota fiscal, localizado na base superior do elevador ou na carenagem inox, abaixo do assento.

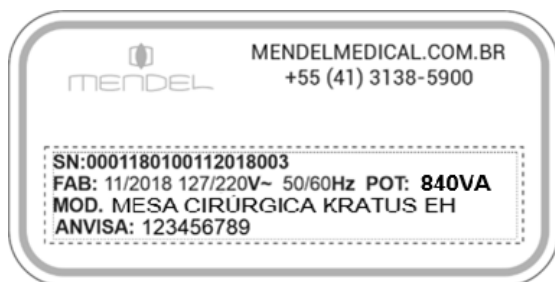


ou por meio do QR CODE, site do fabricante:

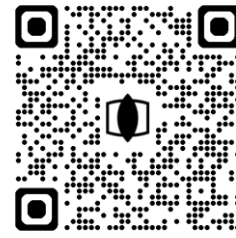

## DESEMBALAGEM

1. Abra a parte superior da embalagem, retire dela cada um dos componentes avulsos e verifique se todos estão devidamente intactos. Em caso de avaria contate o fabricante.
2. Remova as partes laterais da caixa.
3. Remova os calços (item 03) que mantêm a mesa sobre o pallet em um dos lados.
4. Retirar os parafusos com cabeça sextavada M10 X 80 mm (item 02) que prendem a mesa na base do pallet (item 04), usando uma chave de boca ou estrela 17 (milímetros).
5. Pressione o botão localizado no painel de comando do dispositivo (05- lateral da mesa) ao lado do símbolo Liberado/Bloqueado, para liberar as funções do painel de controle.
6. Pressione o botão localizado no painel de comando do dispositivo (05- lateral da mesa) no símbolo Elevador Desce, até descer totalmente a mesa, o que automaticamente libera os rodízios.
7. Retirar a mesa de cima do pallet (item 04).
8. Verificar se os rodízios giram livremente e num ângulo de 360° (item 06).

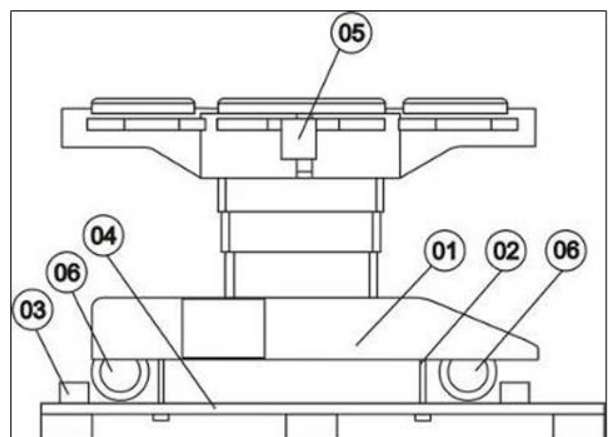

# GUIA RÁPIDO - MESA CIRÚRGICA KRATUS

## MONTAGEM:

- 1.** Verificação da Tensão e Frequência: Certifique-se de que a tensão da rede elétrica e a frequência no local de instalação correspondam às indicadas no dispositivo. Em caso de dúvida, entre em contato com o fabricante.
- 2.** Conexão do Controle Remoto: Conecte o plug do controle remoto à placa de controle lateral da mesa.
- 3.** Conexão do Cabo de Alimentação: Conecte o cabo de alimentação à lateral da mesa e, em seguida, à tomada da rede elétrica. Certifique-se de que o plug de alimentação esteja firmemente conectado e de que o pino de aterramento esteja ligado.
- 4.** Especificações do Circuito de Alimentação local: Verifique se o circuito de alimentação atende às especificações de tensão, potência e frequência conforme indicados no dispositivo médico.
- 5.** Posicionamento da Chave Principal: Coloque a chave principal do dispositivo na posição "I" para ligá-lo. Certifique-se de que esteja na posição correta para o funcionamento adequado.
- 6.** Botão de Emergência: Localizado logo abaixo do painel de comando na lateral da mesa (item 05), deve estar desativado para permitir movimentos da mesa.
- 7.** Acessibilidade do Cabo de Alimentação: Certifique-se de que o cabo de alimentação seja facilmente acessível para desconexão, evitando obstruções.
- 8.** Verificação do Indicador de Bateria: Observe o LED indicador "Carregamento de Bateria" na lateral do chassi da mesa para verificar seu funcionamento adequado.

## LIMPEZA E ASSEPSIA:

- 1.** Remova todas as peças para limpeza e assepsia, utilizando os produtos recomendados para cada parte do equipamento.
- 2.** Siga as instruções detalhadas no manual do usuário para garantir a limpeza adequada de cada componente.
- 3.** Posicione a mesa horizontalmente para facilitar o acesso durante a limpeza.


- 4.** Desencaixe as partes móveis para facilitar a limpeza e assepsia.

### • REPOSITÓRIO DOCUMENTAL

Acesse documentos digitais do dispositivo médico via QR CODE:

- ✓ Manuais do Usuário: instruções de detalhadas de uso do dispositivo.
- ✓ Guias Rápidos: instruções concisas do manual.
- ✓ Vídeos Tutoriais: conteúdos visuais de suporte.
- ✓ Outros: documentos adicionais que possam ser úteis para uso, montagem, manutenção entre outros.

Escaneie o QR CODE para acessar e utilizar o dispositivo com segurança e eficiência.

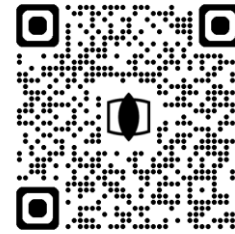

QR CODE é um código que armazena informações. Para ler você precisa:

- ✓ Equipamento portátil: Smartphone ou tablet com câmera.
- ✓ Aplicativo de leitura: Leitor de QR CODE ou câmera.
- ✓ Internet: conexão com a internet será necessária para acessar o conteúdo.

Abra o aplicativo ou a câmera, aponte para o QR CODE e o conteúdo será exibido automaticamente.



**ATENÇÃO:** Certifique-se de que a versão das instruções de uso corresponde ao dispositivo adquirido.



**ATENÇÃO:** Para obter a versão impressa das instruções de uso sem custo adicional, entre em contato com a Fabricante pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Se tiver dúvidas, ligue para o SAC mencionado no rodapé deste documento.

### • ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO

- +55 (41) 3138-5900 
- WhatsApp: +55 (41) 9 9518-0006 
- Horário de Atendimento: Seg - Sex: 8:00h às 17:45h 
- E-mail: [assistenciatecnica@mendelmedical.com.br](mailto:assistenciatecnica@mendelmedical.com.br) 

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	IDIOMA
MM014-092407	00	15/07/2024	Português