

LEMBRE-SE SEMPRE DE CONSULTAR O MANUAL DO USUÁRIO COMPLETO PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS.

Este guia é um resumo. Para mais detalhes sobre desembalagem, montagem, uso, limpeza e assepsia, consulte o Manual do Usuário disponível no site da ANVISA no link abaixo:

Produtos para Saúde ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351208709202488/?cnpj=20102553000162&situacaoNotificacaoRegistro=1>

ou por meio do QR CODE, site do fabricante:




PARA DESEMBALAR, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:



ATENÇÃO: Caso a instalação seja realizada pelo fabricante, aguarde a chegada do técnico responsável. Ele será o encarregado de remover completamente o equipamento da embalagem.

1. Retire o produto de dentro da caixa.
2. Confira os acessórios que acompanham o produto. Se encontrar algo em desacordo, entre em contato imediatamente com o fabricante por meio do telefone (41) 3138-5900.
3. Confira se o número de série do dispositivo coincide com o indicado na nota fiscal, localizado no corpo do motor.

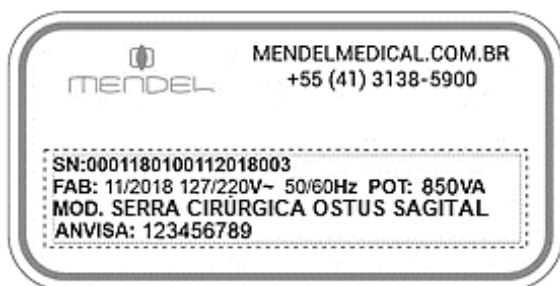

INSTALAÇÃO:

O Serra Cirúrgica Ostus não requer instalação. Para utilizá-lo, basta conectá-lo à rede elétrica e seguir as instruções do capítulo "Instruções de Operação" do manual do usuário.

Condições Mínimas Antes do Uso:

1. Verificação de Tensão e Frequência: Certifique-se de que a tensão (V) e a frequência (Hz) da rede local correspondem às indicadas na etiqueta de série do dispositivo. Em caso de divergência, contate o fabricante.
2. Fiação Adequada: Utilize fiação adequada para evitar problemas de funcionamento e superaquecimento dos fios.
3. Conexão do Plug de Alimentação: Certifique-se de que o plug de alimentação esteja devidamente acoplado e que o pino de aterramento esteja conectado ao aterramento do local de instalação.
4. Conformidade com Normas: Conecte o dispositivo a uma rede elétrica com aterramento conforme a norma ABNT NBR-5410 "Instalações Elétricas em Baixa Tensão". A não utilização do pino terra resultará na perda da garantia.
5. Desconexão da Rede Elétrica: O cabo de alimentação serve como meio de separação e desconexão. Para desconectar, basta retirar o plug da tomada.
6. Esterilização de Partes: Esterilize as partes do dispositivo antes do uso ou reuso conforme o tópico "Conservação, Assepsia e Esterilização" no manual do usuário. Nenhuma peça ou parte do dispositivo é entregue esterilizada de fábrica.

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO

- +55 (41) 3138-5900
- WhatsApp: +55 (41) 9 9518-0006
- Horário de Atendimento: Seg - Sex: 8:00h às 17:45h
- E-mail: assistenciatecnica@mendelmedical.com.br

GUIA RÁPIDO - SERRA CIRÚRGICA OSTUS

INSTRUÇÕES DE USO:


<p>1. Pendure o motor em um suporte, garantindo que ele permaneça na vertical.</p> 	<p>2. Conecte o cabo de transmissão ao motor e ao cabeçote.</p> 	<p>3. Selecione o cabeçote apropriado para o procedimento cirúrgico e conecte o cabo de transmissão no cabeçote.</p> 
<p>4. Certifique-se de que o cabo de transmissão esteja firmemente conectado ao motor e ao cabeçote.</p> 	<p>5. Uso correto do motor.</p> 	<p>6. Durante a cirurgia, use o cabo de transmissão estendido ou na forma de arco longo, evitando dobrá-lo ou um arco curto.</p> 
<p>7. Próximo ao botão liga/desliga, há um led na cor verde que se estiver aceso indica que o dispositivo está apto ao uso. Caso não esteja aceso, verifique se o botão de emergência está acionado. Gire o botão de emergência para liberá-lo.</p> 	<p>8. Ao pressionar o pedal, o dispositivo (cabeçote) aumentará a velocidade de acordo com a pressão exercida.</p> <p>ATENÇÃO: O acionamento do pedal deve ser feito pelo médico que realiza o procedimento, garantindo maior controle.</p> 	

• REPOSITÓRIO DOCUMENTAL

Acesse documentos digitais do dispositivo médico via QR CODE:

- ✓ Manuais do Usuário: instruções de detalhadas de uso do dispositivo.
- ✓ Guias Rápidos: instruções concisas do manual.
- ✓ Vídeos Tutoriais: conteúdos visuais de suporte.
- ✓ Outros: documentos adicionais que possam ser úteis para uso, montagem, manutenção entre outros.

Escaneie o QR CODE para acessar e utilizar o dispositivo com segurança e eficiência.

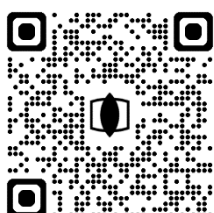

QR CODE é um código que armazena informações. Para ler você precisa:

- ✓ Equipamento portátil: Smartphone ou tablet com câmera.
- ✓ Aplicativo de leitura: Leitor de QR CODE ou câmera.
- ✓ Internet: conexão com a internet será necessária para acessar o conteúdo.

Abra o aplicativo ou a câmera, aponte para o QR CODE e o conteúdo será exibido automaticamente.



ATENÇÃO: Certifique-se de que a versão das instruções de uso corresponde ao dispositivo adquirido. Para obter a versão impressa das instruções de uso sem custo adicional, entre em contato com a Fabricante pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

Se tiver dúvidas, ligue para o SAC mencionado no rodapé deste documento.

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	IDIOMA
MM015-090018	00	16/07/2024	Português