


**LEMBRE-SE SEMPRE DE CONSULTAR O MANUAL DO USUÁRIO COMPLETO PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS E ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS.**

Este guia é um resumo. Para mais detalhes sobre desembalagem, montagem, uso, conexão, limpeza e assepsia, consulte o Manual do Usuário disponível no site da ANVISA no link abaixo:

**Produtos para Saúde ANVISA:**

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351068464202288/?cnpj=20102553000162&situacaoNotificacaoRegistro=1>

ou por meio do QR CODE, site do fabricante:

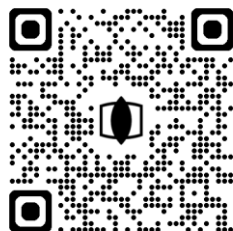


## PARA DESEMBALAR, SIGA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:



**ATENÇÃO:** Caso a instalação seja realizada pelo fabricante, aguarde a chegada do técnico responsável. Ele será o encarregado de remover completamente o equipamento da embalagem.

### Para desembalar seguir as instruções abaixo:

1. Retire o produto de dentro da caixa. Abra a parte superior da embalagem e retire cada um dos componentes avulsos, verificando se todos estão intactos.
2. Confira os acessórios que acompanham o produto. Se encontrar algo em desacordo, entre em contato imediatamente com o fabricante por meio do telefone (41) 3138-5900.
3. Antes de iniciar qualquer procedimento com o dispositivo, leia o manual do usuário. Ele contém informações necessárias para a correta instalação e utilização.
4. Antes da instalação, verifique se a tensão da rede (VAC) e a frequência (Hz) no local correspondem àquelas indicadas na etiqueta nº de série.

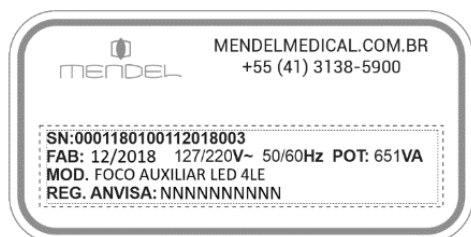

## PREPARAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO: PRÉ INSTALAÇÃO

Antes da instalação, certifique-se das seguintes condições mínimas:

- A pré-instalação do dispositivo deve seguir as orientações específicas do fabricante, variando de acordo com o modelo adquirido.
- A fabricante Mendel Medical não se responsabiliza por danos decorrentes de uma pré-instalação inadequada.
- É responsabilidade do estabelecimento da saúde garantir que o local de instalação esteja pronto conforme instruções fornecidas.
- A fabricante Mendel Medical oferece suporte técnico para o usuário, sempre que necessário, também fornecerá treinamento de uso para os dispositivos adquiridos.
- Verifique a capacidade de carga da laje, garantindo que seja suficiente para suportar o peso do equipamento.

Antes de prosseguir com a instalação do dispositivo, é crucial as verificações e preparativos. Estes passos são essenciais para garantir uma instalação adequada e sem contratemplos. Abaixo estão os pontos que devem ser verificados antes de acionar a assistência técnica autorizada:

- Remoção do Equipamento Anterior: Certifique-se de que qualquer disposto equipamento anteriormente instalado foi devidamente removido para liberar espaço e evitar interferências.

# GUIA RÁPIDO – SUPORTE EQUIPAMENTO

- Furação para Fixação: Verifique se a furação necessária para a fixação do novo dispositivo foi realizada conforme as especificações.
- Passagem de Cabos Elétricos: Garanta que os eletrodutos e cabos elétricos tenham sido passados de acordo com as instruções fornecidas, garantindo uma conexão elétrica segura e adequada.
- Cabeamento de Sinais: Se aplicável, certifique-se de que também foi realizado o cabeamento de sinais conforme as orientações específicas do dispositivo.
- Tubulação de Gases: Caso o dispositivo necessite de alimentação por gases, verifique se a tubulação correspondente foi instalada corretamente, incluindo válvulas de fechamento e conexões rápidas.
- Pressão de Ar Adequada: Se o dispositivo requer ar comprimido para o acionamento de freios ou outras funções, assegure-se de que a pressão de ar disponível seja suficiente e esteja dentro dos parâmetros recomendados.
- Material de Instalação: Certifique-se de ter adquirido todo o material necessário para a instalação, como barras roscadas, arruelas, porcas, chumbador químico, entre outros, conforme as indicações do fabricante.
- Reserva da Sala: Agende a instalação em uma data conveniente e assegure-se de que a sala onde o equipamento será instalado esteja reservada e disponível.
- Acompanhamento Técnico: Designe uma pessoa da equipe de manutenção para acompanhar os técnicos durante a instalação, fornecendo suporte e esclarecendo dúvidas, se necessário.

Após verificar todos esses pontos, entre em contato com a assistência técnica autorizada e envie uma foto da pré-instalação.




**ATENÇÃO:** O envio das fotos é obrigatório para que a equipe possa avaliar e prosseguir com o processo de instalação de forma eficiente e segura.

## • REPOSITÓRIO DOCUMENTAL

Acesse documentos digitais do dispositivo médico via QR CODE:

- ✓ Manuais do Usuário: instruções de detalhadas de uso do dispositivo.
- ✓ Guias Rápidos: instruções concisas do manual.
- ✓ Vídeos Tutoriais: conteúdos visuais de suporte.
- ✓ Outros: documentos adicionais que possam ser úteis para uso, montagem, manutenção entre outros.

**Escaneie o QR CODE para acessar e utilizar o dispositivo com segurança e eficiência.**

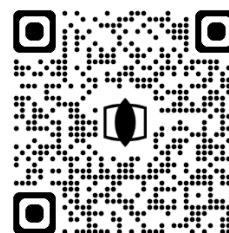

QR CODE é um código que armazena informações. Para ler você precisa:

- ✓ Equipamento portátil: Smartphone ou tablet com câmera.
- ✓ Aplicativo de leitura: Leitor de QR CODE ou câmera.
- ✓ Internet: conexão com a internet será necessária para acessar o conteúdo.

Abra o aplicativo ou a câmera, aponte para o QR CODE e o conteúdo será exibido automaticamente.



**ATENÇÃO:** Certifique-se de que a versão das instruções de uso corresponde ao dispositivo adquirido.



**ATENÇÃO:** Para obter a versão impressa das instruções de uso sem custo adicional, entre em contato com a Fabricante pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC).

**Se tiver dúvidas, ligue para o SAC mencionado no rodapé deste documento.**

## • ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO

- +55 (41) 3138-5900 
- WhatsApp: +55 (41) 9 9518-0006 
- Horário de Atendimento: Seg - Sex: 8:00h às 17:45h 
- E-mail: [assistenciatecnica@mendelmedical.com.br](mailto:assistenciatecnica@mendelmedical.com.br) 

CÓDIGO	REVISÃO	DATA	IDIOMA
MM017-090055	01	18/07/2024	Português