

GUÍA RÁPIDA - FOCO AUXILIAR


RECUERDE SIEMPRE CONSULTAR EL MANUAL DEL USUARIO COMPLETO PARA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA Y ORIENTACIONES ESPECÍFICAS.

Esta guía es un resumen. Para más detalles sobre desembalaje, montaje, uso, conexión, limpieza y asepsia, consulte el manual del usuario disponible en el sitio web de ANVISA en el siguiente enlace:

Productos para la salud ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351987410202132/?cnpj=20102553000162&situacaoNotificacaoRegistro=1>

o por QR CODE, sitio web del fabricante:

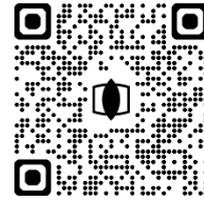

PARA DESEMBALAR, SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN:




ATENCIÓN: Si la instalación es realizada por el fabricante, espere a que llegue el técnico responsable. Él será el encargado de retirar completamente el equipo del embalaje.



1. Saca el producto de la caja. Abra la parte superior del paquete y retire cada uno de los componentes individuales, comprobando que todos están intactos.

2. Para desembalar la base del pedestal, siga los siguientes pasos:



a- Abre el paquete de cartón y saca el producto del interior.

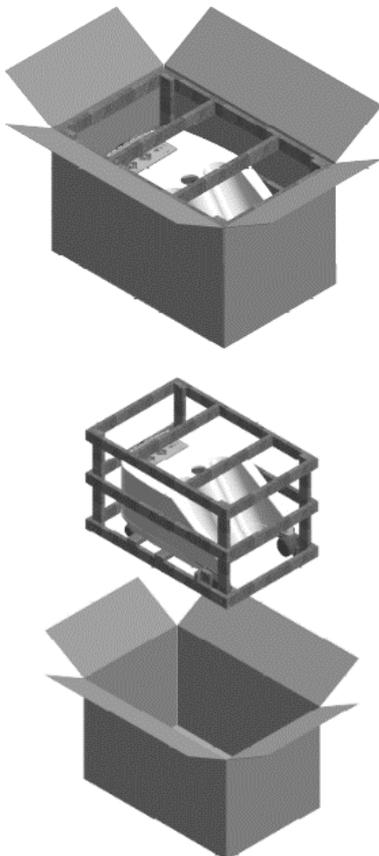


b- Quita los tornillos Phillips de las cuatro esquinas inferiores y separa la parte superior del marco de madera.

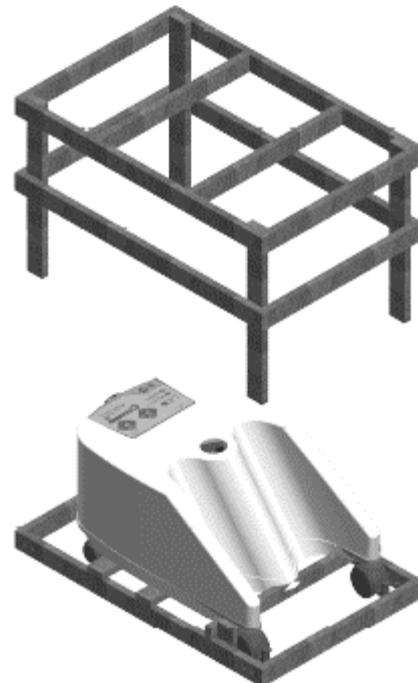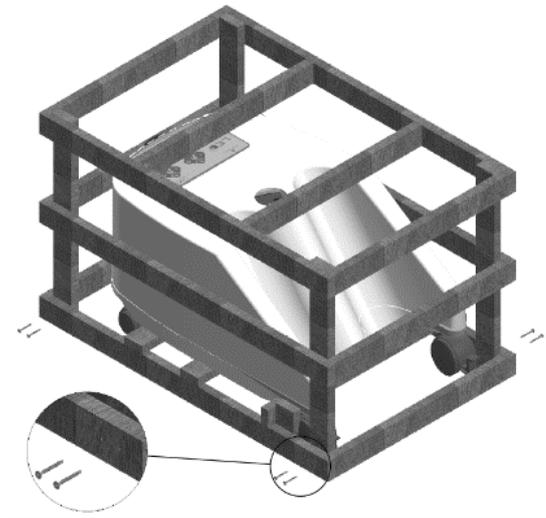



- c-** Desenrolle el cable de alimentación que está en la parte posterior de la base del pedestal y retire cualquier fijación que esté sujetando la carenada.

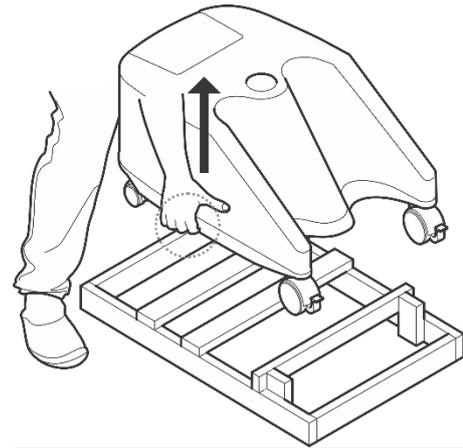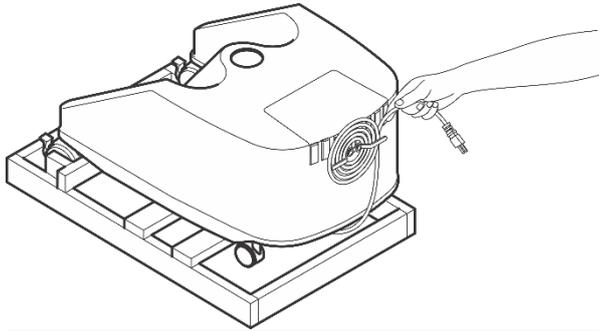

- d-** Desconecte el carenado y levántelo, con cuidado de no forzar los látigos internos. Así tendrás acceso al sistema de fijación del pedestal en la estructura de madera. Quita la tuerca de fijación, la barra roscada y el calzo de madera. Vuelve a colocar la carenada en su posición original.

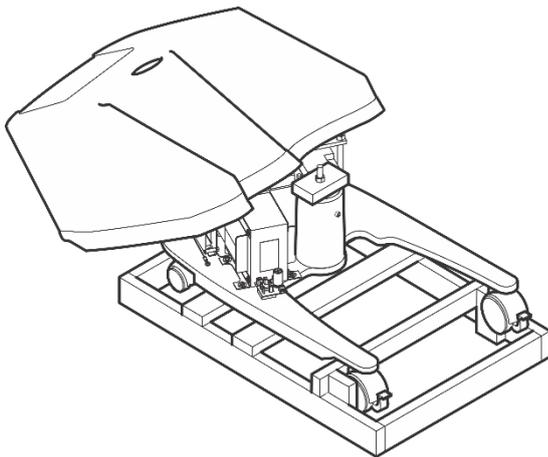

- 3.** Revisa los accesorios que vienen con el producto. Si encuentra algo inconsistente, póngase en contacto con el fabricante inmediatamente a través del teléfono (41) 3138-5900.
- 4.** Antes de iniciar cualquier procedimiento con el dispositivo, lea el manual del usuario. Contiene información necesaria para la correcta instalación y uso.
- 5.** Antes de la instalación, compruebe que el voltaje de red (VAC) y la frecuencia (Hz) en el sitio corresponden a los indicados en la etiqueta del número de serie.

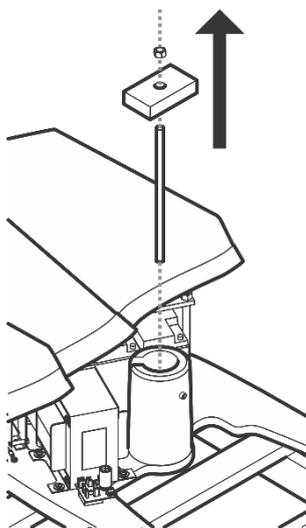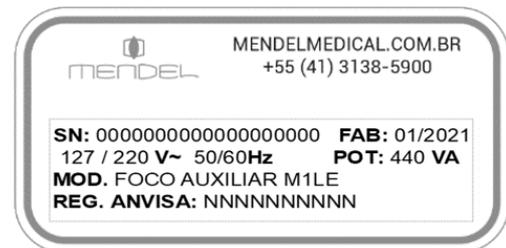

- e-** Retire el conjunto base pedestal levantándolo por la base de aluminio.



MONTAJE - INSTALACIÓN

1. Insertar el tubo de pedestal:

Pase el anillo de acabado por el tubo del pedestal y el agujero de la carenada. Coloque el tubo de pedestal en la base de aluminio como se muestra.





ATENCIÓN: Tenga cuidado con los cables conectados en la base y en el carenado.

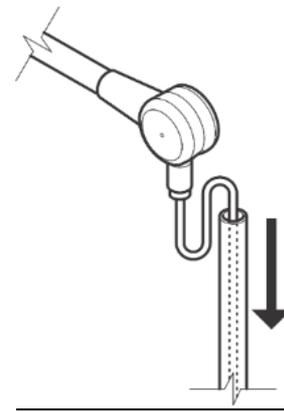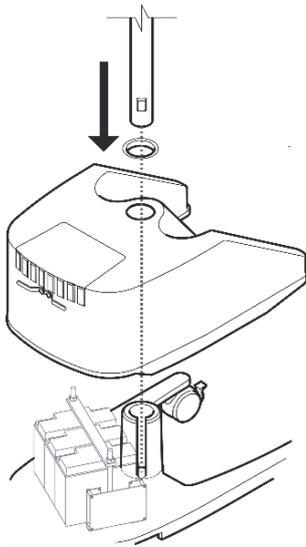


4. Encajar la articulación:

Inserte la articulación en el agujero del pedestal y fíjela con el tornillo correspondiente.

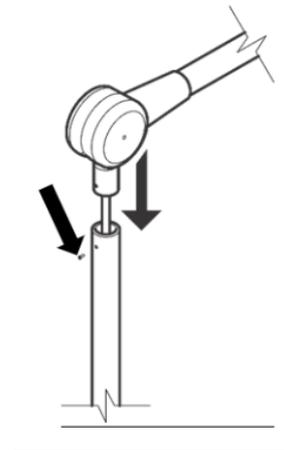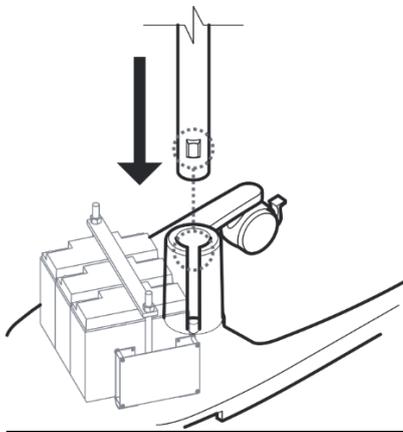

2. Fijar el tubo del pedestal:

Apriete el tornillo para asegurar la fijación del tubo de pedestal.

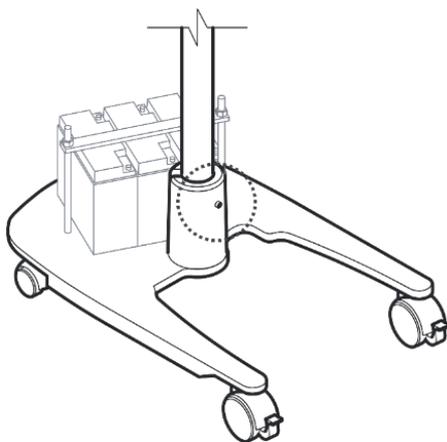


3. Pasar los cables:

Con la articulación en las manos, pase los cables por el interior del tubo de pedestal, asegurándose de que lleguen a la base.

5. Conectar los cables:

Los cables del paso 3 deben pasar por la abertura de la base y la conexión debe hacerse como sigue:


- Cable azul - conectar a la placa V+.
- Cable negro - conectar a la placa 0V;
- Cable Verde/Amarillo (o verde), conecte al cable de tierra cerca de la placa.

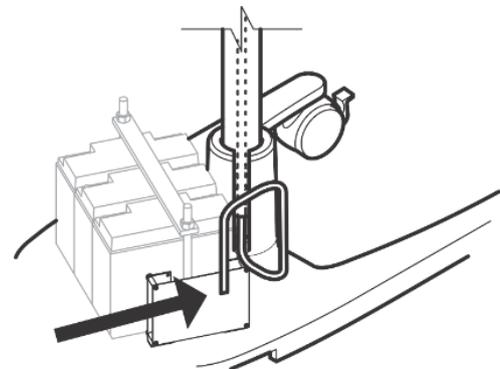

GUÍA RÁPIDA - FOCO AUXILIAR


6. Conectar el cable de la batería

El cable positivo de las baterías se envía desconectado. Conecte el cable positivo de la batería (rojo) a la placa del cargador.

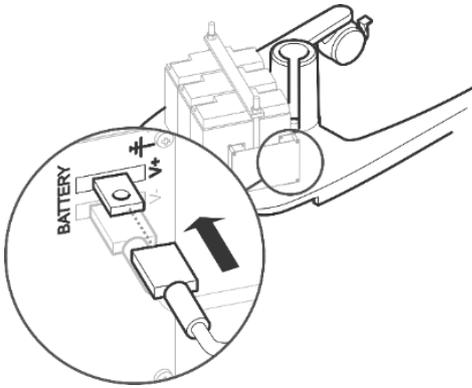


7. Fijar la carenada:

Encaje la carenada en la base y use el anillo de goma para bloquearla.

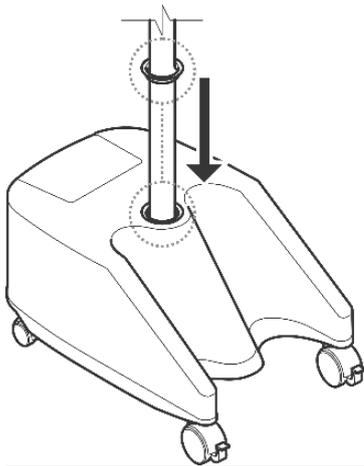

8. Montar la cúpula:

Posiciona y monta la cúpula en la articulación alineando correctamente los pernos de contacto de la cúpula con el conector giratorio de la articulación. Asegúrate de haber colocado el acabado de goma alrededor del tubo de la articulación.

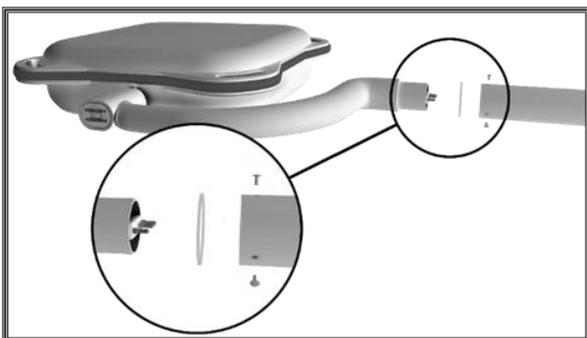

9. Completar el montaje:

Asegúrese de que todos los componentes están montados correctamente y de forma segura.

El equipo está listo para usar.

• ARCHIVO DOCUMENTAL

Acceda a documentos digitales del dispositivo médico vía QR CODE:

- ✓ Manuales de usuario: instrucciones detalladas para el uso del dispositivo.
- ✓ Guías rápidas: instrucciones concisas del manual.
- ✓ Videos Tutoriales: Contenido visual de apoyo.
- ✓ Otros: documentos adicionales que pueden ser útiles para el uso, montaje, mantenimiento entre otros.

Escanee el QR CODE para acceder y usar el dispositivo de forma segura y eficiente.



El código QR es un código que almacena información. Para leerlo, necesitas:

- ✓ Equipo portátil: Smartphone o tableta con cámara.
- ✓ Aplicación de lectura: lector de códigos QR o cámara.
- ✓ Internet: se requiere conexión a Internet para acceder al contenido.

Abre la aplicación o cámara, apunta al QR CODE y el contenido se mostrará automáticamente.



ATENCIÓN: Asegúrese de que la versión de las instrucciones de uso corresponde al dispositivo adquirido. Para obtener la versión impresa de las instrucciones de uso sin costo adicional, póngase en contacto con el fabricante a través del servicio de atención al cliente (SAC).

Si tiene alguna pregunta, llame al SAC que se menciona en el pie de página de este documento.

• ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

- +55 (41) 3138-5900 
- WhatsApp: +55 (41) 9 9518-0006 
- Horario de apertura: Lunes – Viernes: 8:00h a 17:45h 
- E-mail: assistenciatecnica@mendelmedical.com.br 

CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA	IDIOMA
MM013-090072	00	18/07/2024	Español