


RECUERDE SIEMPRE CONSULTAR EL MANUAL DEL USUARIO COMPLETO PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA Y DIRECTRICES ESPECÍFICAS.

Esta guía es un resumen. Para más detalles sobre desembalaje, montaje, uso, conexión, limpieza y asepsia, consulte el Manual de Usuario disponible en el sitio web de ANVISA en el siguiente enlace:

Productos de Salud ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351987410202132/?cnpj=20102553000162&situacaoNotificacaoRegistro=1>

o a través del CÓDIGO QR, página web del fabricante:

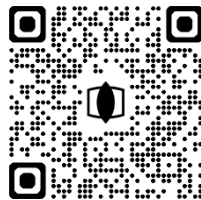

ATENCIÓN: Si la instalación la realiza el fabricante esperar a que llegue el técnico responsable. Él será el encargado de sacar completamente el equipo de su embalaje.

PARA DESEMBALAR

1. Verifique la integridad del embalaje cuando lo reciba.
2. Abra con cuidado el embalaje de madera.
3. Retire el dispositivo y confirme que esté intacto y completo.
4. Comprueba que el número de serie del dispositivo coincide con el indicado en la factura.
5. Antes de la instalación, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la red coincidan con las especificaciones de la etiqueta del número de serie.





MONTAJE E INSTALACIÓN

No hay necesidad de montaje e instalación. El dispositivo se entrega listo para usar.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica.
2. Encienda el dispositivo colocando el interruptor de encendido/apagado en la posición (I).
3. Regular la altura del brazo aflojando la pieza de sujeción, ajustando y apretando nuevamente.
4. Para mover la cúpula, afloje la manija, inclínela a la posición deseada y apriétela nuevamente.
5. Apague el dispositivo colocando el interruptor de encendido/apagado en la posición (O).

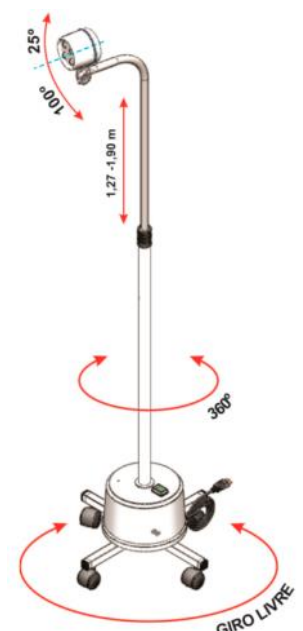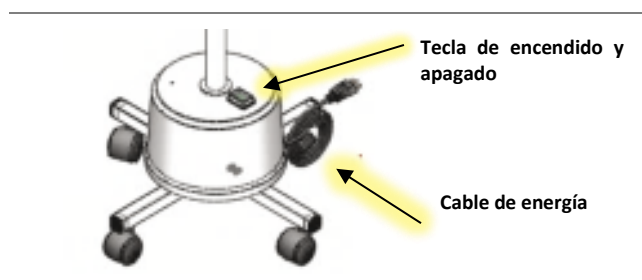

GUÍA RÁPIDA – FOCO AUXILIAR PARABÓLICO

FUSIBLES Y INTERRUPTORES TÉRMICOS

Para cambiar fusibles utilice los siguientes valores:

- Fusibles F1 y F2 para 127Vac y 220Vac - 0,5 A con retardo.

• ARCHIVO DOCUMENTAL

Acceda a documentos de dispositivos médicos digitales mediante CÓDIGO QR:

- ✓ Manuales de usuario: instrucciones detalladas para utilizar el dispositivo.
- ✓ Guías rápidas: instrucciones manuales concisas.
- ✓ Vídeos tutoriales: soporte de contenido visual.
- ✓ Otros: documentos adicionales que pueden ser de utilidad para su uso, montaje, mantenimiento, entre otros.

Escanee el CÓDIGO QR para acceder y utilizar el dispositivo de forma segura y eficiente.



El CÓDIGO QR es un código que almacena información. Para leer necesitas:

- ✓ Equipo portátil: Smartphone o tablet con cámara.
- ✓ Aplicación de lectura: lector de CÓDIGOS QR o cámara.
- ✓ Internet: Será necesaria conexión a Internet para acceder al contenido.


Abra la aplicación o la cámara, apunte al CÓDIGO QR y el contenido se mostrará automáticamente.




ATENCIÓN: Asegúrese de que la versión de las instrucciones de uso corresponda al dispositivo adquirido. Para obtener la versión impresa de las instrucciones de uso sin costo adicional, comuníquese con el Fabricante a través de Servicio al Cliente (SAC).

Si tiene preguntas, llame al SAC mencionado al pie de este documento.

• ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

+55 (41) 3138-5900 

WhatsApp: +55 (41) 9 9518-0006

 Horario de apertura: lunes a viernes: de 8:00h a 17:45h.

 E-mail: assistenciatecnica@mendelmedical.com.br

CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA	IDIOMA
MM013-090073	00	18/07/2024	Español