

# GUÍA RÁPIDA - MESA QUIRÚRGICA KRATUS

**RECUERDE SIEMPRE CONSULTAR EL MANUAL DEL USUARIO COMPLETO PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA Y DIRECTRICES ESPECÍFICAS.**

Esta guía es un resumen. Para más detalles sobre desembalaje, montaje, uso, conexión, limpieza y asepsia, consulte el Manual de Usuario disponible en el sitio web de ANVISA en el siguiente enlace:

**Productos ANVISA Salud:**


<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351060214202208/?cnpj=20102553000162&situacaoNotificacaoRegistro=1>

## **PARA DESEMBALAR, SIGA LAS INSTRUCCIONES A CONTINUACIÓN:**




**ATENCIÓN:** Si la instalación la realiza el fabricante esperar a que llegue el técnico responsable. Él será el encargado de sacar completamente el equipo de su embalaje.


- a.** Retire el producto de la caja, según el tema DESEMBALAJE.
- b.** Consulte los accesorios que vienen con el producto. Si encuentra algo inconsistente, comuníquese con el fabricante de inmediato llamando al (41) 3138-5900.

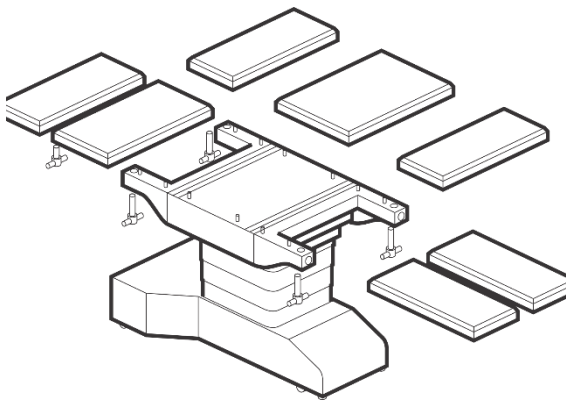

- c.** Compruebe que el número de serie del dispositivo coincida con el indicado en la factura, situada en la base superior del elevador o en el carenado de acero inoxidable, debajo del asiento.

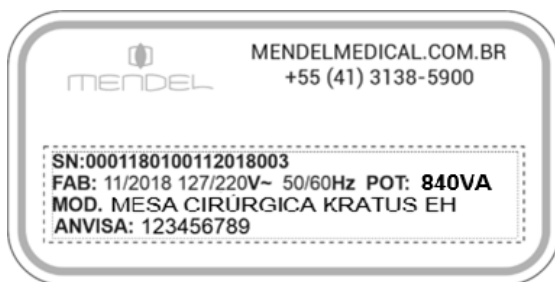


ou por meio do QR CODE, site do fabricante:

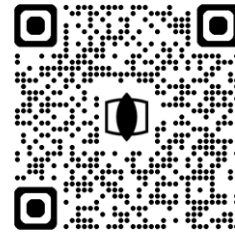

## **DESEMBALAJE**

- 1.** Abra la parte superior del embalaje, retire cada uno de los componentes por separado y compruebe que todos están correctamente intactos. En caso de avería, póngase en contacto con el fabricante.
- 2.** Retire los lados de la caja.
- 3.** Retire los calzos (elemento 03) que mantienen la mesa sobre el palet en un lado.
- 4.** Retire los tornillos con cabeza hexagonal M10.
- 5.** Presione el botón ubicado en el panel de control del dispositivo (05 - lado de la tabla) al lado del símbolo Liberado/Bloqueado, para liberar las funciones del panel de control.
- 6.** Presione el botón ubicado en el panel de control del dispositivo (05 - lado de la mesa) sobre el símbolo Elevador Bajar, hasta que la mesa esté completamente bajada, lo que libera automáticamente las ruedas.
- 7.** Retire la mesa del palet (elemento 04).
- 8.** Verifique que las ruedas giren libremente y en un ángulo de 360° (elemento 06).

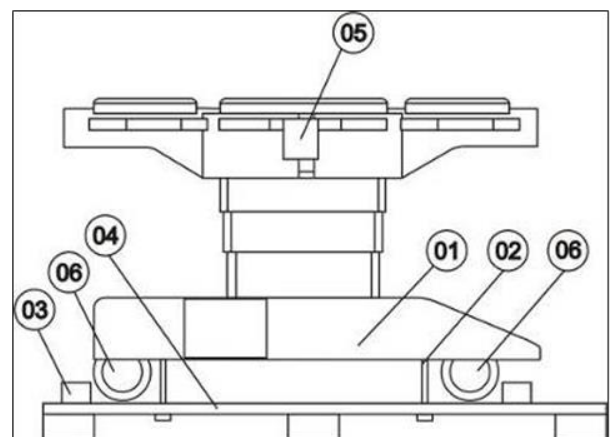

# GUÍA RÁPIDA - MESA QUIRÚRGICA KRATUS

## Montaje:

- 1.** Comprobación de voltaje y frecuencia: Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la red en el lugar de instalación correspondan con los indicados en el dispositivo. En caso de duda, póngase en contacto con el fabricante.
- 2.** Conexión del control remoto: Conecte el enchufe del control remoto al tablero de control del lado de la mesa.
- 3.** Conexión del cable de alimentación: Conecte el cable de alimentación al costado de la mesa y luego al tomacorriente. Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté conectado firmemente y que la clavija de tierra esté conectada.
- 4.** Especificaciones del circuito de alimentación local: Verifique que el circuito de alimentación cumpla con las especificaciones de voltaje, potencia y frecuencia indicadas en el dispositivo.
- 5.** Posicionamiento del interruptor principal: Coloque el interruptor principal del dispositivo en la posición "I" para encenderlo. Asegúrese de que esté en la posición correcta para un funcionamiento adecuado.
- 6.** Botón de Emergencia: Ubicado justo debajo del panel de control al costado de la mesa (elemento 05), debe desactivarse para permitir movimientos de la mesa.
- 7.** Accesibilidad del cable de alimentación: asegúrese de que el cable de alimentación sea fácilmente accesible para desconectarlo y evitar obstrucciones.
- 8.** Comprobación del indicador de batería: observe el indicador LED de "Carga de batería" en el costado del chasis de la mesa para verificar que esté funcionando correctamente.

## LIMPIEZA Y ASEPSIA:

- 1.** Retire todas las piezas para limpieza y asepsia, utilizando los productos recomendados para cada pieza del equipo.
- 2.** Siga las instrucciones detalladas en el manual de usuario para garantizar una limpieza adecuada de cada componente.


- 3.** Coloque la mesa horizontalmente para facilitar el acceso durante la limpieza.
- 4.** Separe las partes móviles para facilitar la limpieza y la asepsia.

### • ARCHIVO DOCUMENTAL

Acceda a documentos de dispositivos médicos digitales mediante CÓDIGO QR:

- ✓ Manuales de usuario: instrucciones detalladas para utilizar el dispositivo.
- ✓ Guías rápidas: instrucciones manuales concisas.
- ✓ Vídeos tutoriales: soporte de contenido visual.
- ✓ Otros: documentos adicionales que pueden ser de utilidad para su uso, montaje, mantenimiento, entre otros.

Escanee el CÓDIGO QR para acceder y utilizar el dispositivo de forma segura y eficiente.

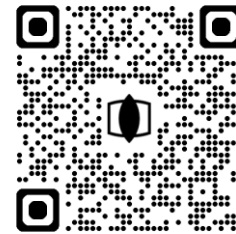

El CÓDIGO QR es un código que almacena información. Para leer necesita:

- ✓ Equipo portátil: Smartphone o tablet con cámara.
- ✓ Aplicación de lectura: lector de CÓDIGOS QR o cámara.
- ✓ Internet: Será necesaria conexión a Internet para acceder al contenido.

Abra la aplicación o la cámara, apunte al CÓDIGO QR y el contenido se mostrará automáticamente.







**ATENCIÓN:** Asegúrese de que la versión de las instrucciones de uso corresponda al dispositivo adquirido.



**ATENCIÓN:** Para obtener la versión impresa de las instrucciones de uso sin costo adicional, comuníquese con el Fabricante vía Servicio de Atención al Cliente (SAC).

Si tiene preguntas, llame al SAC mencionado al pie de este documento.

### • ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

- +55 (41) 3138-5900 
- WhatsApp: +55 (41) 9 9518-0006 
- Horario de apertura: lunes a viernes: de 8:00h a 17:45h 
- E-mail: [asistenciatecnica@mendelmedical.com.br](mailto:asistenciatecnica@mendelmedical.com.br) 

CÓDIGO	REVISIÓN	FECHA	IDIOMA
MM014-092407	00	15/07/2024	Español